

安裝說明書

よかレールマット

『扶樂起』專用墊



目錄	頁
產品規格	封面
安全說明	1
安裝說明	2
保養說明	封底

PJ01M-S1 系列

PJ01M-L1 系列

感謝您購買『扶樂起』固定扶手專用導軌墊。
請務必在安裝和使用前閱讀本使用說明書，以確保正確使用。

- 如果產品將由需要幫助的人使用，護理人員也必須閱讀本使用說明書。
- 閱讀後，請將本使用說明書妥善保管。
- 如果您將產品轉讓給他人，也請將本使用說明書轉交給他們。
- 由於產品改進，您購買的產品可能與本使用說明書的部分內容有所不同。
- 如有任何疑問，請與我們聯絡。

產品特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 專用墊背面有黏性表面，可黏在底座上，防止使用時專用墊滑落。 ● 黏在底座上，即使赤腳站在上面也不會感到寒冷。 ● 可清洗。
------	---

產品規格

產品尺寸	<p>485</p> <p>585</p> <p>(單位：mm)</p>	<p>485</p> <p>885</p> <p>(單位：mm)</p>
型號	PJ01M-S1 系列	PJ01M-L1 系列
品名	『扶樂起』【短型】專用墊	『扶樂起』【長型】專用墊
材質	表面：100% 聚酯 背面：丙烯酸樹脂	表面：100% 聚酯 背面：丙烯酸樹脂
適用型號	PJ01-AS 扶樂起 (中央型) 扶手架 PJ01-CS 扶樂起 (□字型) 扶手架	PJ01-AL 扶樂起 (側面型) 扶手架 PJ01-BL 扶樂起 (加長型) 扶手架
原產地	日本	日本

安全說明 ※ 請務必遵守。

本使用說明書中包含各種圖形符號，以確保安全正確地使用產品，並防止對使用者或他人造成傷害以及造成財產損失。
請在正確使用產品前仔細閱讀並理解以下內容。



警告

此符號表示「可能導致危及生命或嚴重傷害的內容」。



注意

此符號表示「可能導致人身傷害或財產損失的內容」。

警告

- 請勿與扶樂起以外的任何產品組合使用。
 - 否則可能會造成損壞或事故。此外，我們不保證與其他公司產品組合使用的產品不會有任何問題。
- 請勿將其用於安裝到扶樂起底座以外的任何其他用途。
 - 否則可能會導致受傷或意外。
- 請勿放置在爐灶或其他明火附近。
 - 否則可能會導致火災或燙傷。
- 請勿在潮濕時使用，也請勿在底座潮濕時安裝。
 - 有滑倒和受傷的風險。
- 將黏合面貼到底座上。（請勿將正反面貼錯。）
 - 有滑倒和受傷的風險。
- 如果黏合面或底座上有異物，請勿使用。
 - 黏合力可能會減弱，導致滑倒和受傷的風險。
- 使用前，請先撕下保護膜，然後再貼在底座上。
 - 如果不撕掉保護膜，專用墊將不會黏附，並且存在滑倒和受傷的風險。

注意

- 貼在基座表面時，請用手按壓以防止起皺。
 - 否則，專用墊可能會不平整，導致跌倒。
- 定期從基座表面移除並進行維護。
 - 黏合面可能會黏在基座表面上。
- 如果黏合力減弱，請更換新的專用墊。
 - 專用墊可能無法黏住，導致滑倒和受傷。
- 請勿在陽光直射、戶外或炎熱潮濕的地方使用。
 - 這可能會導致黏合面劣化或變質。
- 每種產品均設計為對應型號的扶樂起固定式扶手專用。請勿與其他不同類型的產品一起使用。
 - 這可能會導致無法安裝或在產品上留下不必要的孔洞。
- 請按照本使用說明書中的說明維護每個產品。
 - 這可能會導致變形、變色或劣化。

安裝說明

請查看下圖中的<專用墊切割位置>，並根據您的『扶樂起』的型號切割專用墊上支柱的位置。


※ 專用墊的支柱位置帶有孔眼，因此可以輕鬆手動切割。

<專用墊切割位置> ※ 請剪掉 (●黑色圓圈) 支柱位置。


PJ01-AS (中央型)	PJ01M-S1系列 (短尺寸適用)	PJ01-CS (口字型)	PJ01M-S1系列 (短尺寸適用)	沿著圓型孔洞的虛線剪開。 地墊 穿孔虛線	
	 如圖示剪下 2個黑色圓圈		 如圖示剪下 4個黑色圓圈		
PJ01-AL (側面型)	PJ01M-L1系列 (長尺寸適用)	PJ01-BL (加長型)	PJ01M-L1系列 (長尺寸適用)	PJ01-BL (加長型)	PJ01M-L1系列 (長尺寸適用)
	 如圖示剪下 2個黑色圓圈	 <支柱安裝位置1>	 如圖示剪下 2個黑色圓圈	 <支柱安裝位置2>	 如圖示剪下 2個黑色圓圈

<貼合方式>

1 把專用墊背面的保護膜整片撕掉。

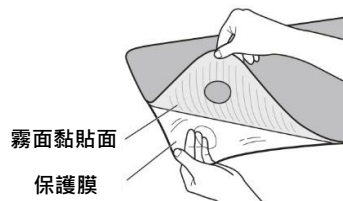

2 把專用墊的黏合面朝向底座，然後從支柱頂部並與專用墊上的支柱孔對齊。

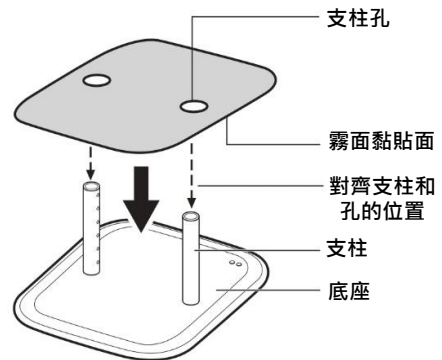

3 將專用墊貼到底座表面時，請確保其不與支柱或底座的橡膠重疊，並用手輕輕按壓以防止專用墊上形成皺摺。




保養說明

⚠ 注意

- 清潔時請勿使用以下物品：
酸性或鹼性清潔劑、稀釋劑或苯胺等有機溶劑、衣物柔順劑或漂白劑（含氯或含氧基）。
 - 這些物品可能會導致專用墊變形、變色或老化。
- 如果清洗後專用墊的孔眼撕裂，請更換新專用墊。
 - 可能會被撕裂的孔眼絆倒受傷。
- 請勿使用烘乾機。
 - 這些可能會導致專用墊變形、變色或老化。
- 烘乾時請勿暴露在陽光直射下。
 - 這些可能會導致專用墊變形、變色或老化。
- 如果專用墊的吸附面黏附有異物，請用膠帶將其去除或清洗乾淨。
 - 這可能會滑倒受傷。
- 拆卸專用墊進行清潔時，請緩慢取出。
 - 吸附性材料可能會黏附在專用墊與底座中間。
如果發生這種情況，請用沾有溫水的布擦拭。

如何清潔底座上的專用墊

- 清除專用墊表面的污垢，請使用吸塵器或膠帶清除異物，然後用沾溫水的布擦拭，再用乾布擦乾水分，使其自然晾乾。
- 如果專用墊嚴重髒污，請用沾有少量肥皂水或溫和清潔劑的濕布擦拭，再用乾布擦乾水分，使其自然晾乾。

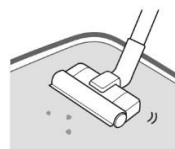

如何清洗專用墊

- 清洗時請按照下面的標識內容進行。



水溫最高30C，
洗衣機請使用弱水流清洗



請勿使用漂白劑處理



清洗完成後
請勿進行滾筒烘乾



請在陰涼處晾乾



請勿使用熨斗



請勿乾洗

廢棄方式

- 廢棄本產品時，請遵守當地政府法規進行處置。



英屬開曼群島商勝邦福樂智股份有限公司台灣分公司
展示中心:新北市汐止區南陽街258號6樓
服務電話:(02) 2986-0551

'23.06月作成

NPO302-D