

重要提示

昇活椅(高級版)動作不正常 - 復歸操作方法

當遇到椅子操作上的問題，動作不正常時，請馬上停止操作並施做以下步驟。

步驟:

1. “同時” 按下並 “持續” 按著控制器中椅背控制的兩個按鈕(控制器從上面數下來第二排左右兩個按鈕，如下圖所示)



2. 同時按下後待數秒，程式就會開始執行推桿歸位。這時候按鈕依然需 “持續按著”，不能放開。
3. 待推桿完成歸位後，控制器上的燈號指示會 “閃爍” 幾下通知完成。完成後就可以放開按鍵，開始使用。

影片教學，請掃描 QR 碼

