

產品保固卡

銷售日期： 年 月 日

銷售人員簽章

經銷商店章

SINCE 1981
Nova光星



兩階式助行器

使用說明書/保固卡

NOVA助行器(未滅菌)

衛署醫器製壹字第000140號

前言

● 序言：

感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護，讓您擁有更完善的照護與行動力。
若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


● 设计理念：

本產品採鋁合金為主體材質以兼具輕量與安全性，握把處做兩階式高度的設計，方便使用者由坐姿站起時可以分兩階段抓握、支撐站起，進而降低因失去重心而跌倒受傷的風險。

注意事項

- 調整助行器時，請穿著合腳防滑的鞋子，若更換鞋子有落差之時，務必微調助行器高度後再使用，以達最佳使用效果避免造成傷害。
- 使用前必須檢查骨架結構是否變形，螺絲是否鎖緊，腳墊有無碎裂等情形。
- 使用助行器時，建議於平地使用，避免於崎嶇路面行走，以免發生危險。
- 上下樓梯時不適合使用助行器來輔助，可利用樓梯扶手來支撐身體跨走階梯。
- 避免於地面潮濕、光線不足及有障礙物時行走，以免滑倒或絆倒。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。

部位介紹

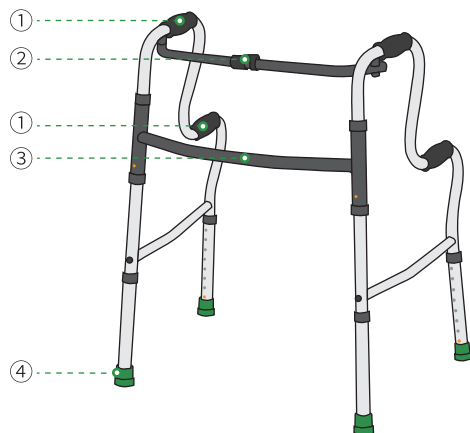

- | | |
|--------|---------|
| ① 手握把 | ③ H 形支架 |
| ② 收合開關 | ④ 腳墊 |

技術規格

產品規格	4092 兩階式(標準型)	4092 兩階式(迷你款)
	合成橡膠	
握把材質	鋁合金	
主體材質	一寸 (25.4 mm)	
主體管徑	160-190cm	140-160cm
適用身高	44.5cm	
扶手內寬	52cm	
扶手外寬	18cm (八段式調整高度)	10cm (五段式調整高度)
可調高度	120kg	
最大荷重	79-97cm	69-79cm
展開全高	60.5cm	
展開全寬	48cm	
展開全深	<標準型> 寬 60.5/深 12/高 79cm <迷你款> 寬 60.5/深 12/高 69cm	
收合體積		

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當腳墊、握把...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明

1、保固範圍

- 本產品於正常使用及維護下，主體骨架為兩年期保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。


2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：腳墊、握把...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。

如何展開/收合助行器


● 展開：

分別將左、右主架向外扳開並推送，使收合開關鈕下方的銅珠彈起才算完成開啟動作。

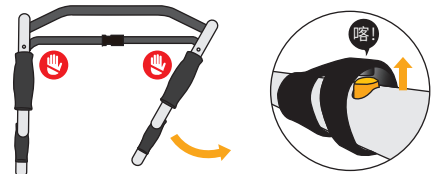

● 收合：


先將收合開關鈕向下壓送並保持，此時將左、右主架往內收合即完成收合動作。

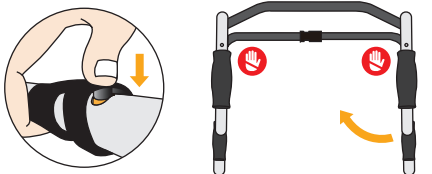

 警告：小心夾手


如何調整助行器高度

- 按下銅珠同時將內管稍微旋轉後即可上下調整內管長度。
- 沿著調整孔將助行器調整到適合自己身形的長度。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔，以維持調整後的助行器長度。
- 助行器的四根腳管須調整至相同高度後才可使用。

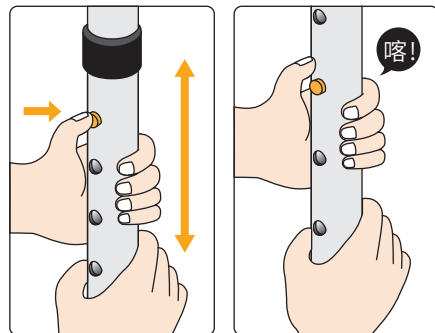

如何調整適合自己的高度

- 穿著日常行走的鞋子。
- 雙手垂放，助行器手握把高度約與髖關節或手腕關節齊平。
- 雙腳腳跟與助行器的後腳平行並手持握把時，手肘彎曲約 15-30 度。

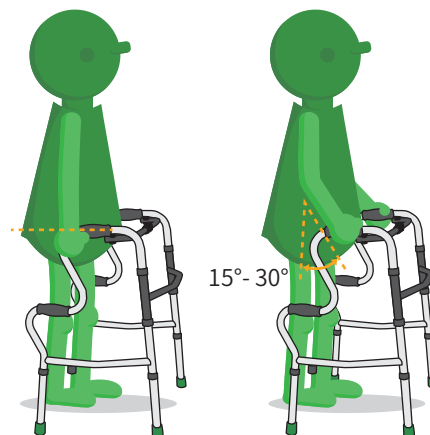


如何用助行器起身

- 起身時，將身體重心向前，雙手平均施力於下階的手握把並撐起身體。
- 先將單手上移於上階的手握把上，透過上方的支撐並將次手上移握住，轉換為站立姿勢。



如何正確使用助行器

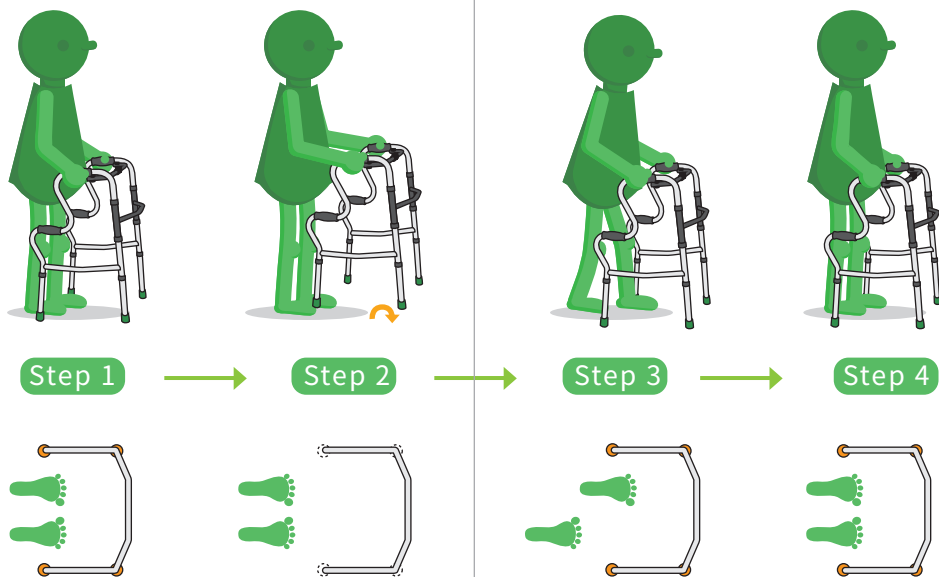

使用步驟說明

Step 1

確實地握住助行器的手握把。

Step 2

視個人身體狀況將助行器抬起並往前移動約一小步的距離。

Step 3

身體重心平均施力於手握把上，先跨出單側下肢約一小步距離並緩慢著地。

Step 4

透過手握把支撐將身體重心向前，並跨移次肢向前跟進一步，即完成行走動作。

光星骨科復健器材股份有限公司

NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE, INC

Web : www.novaortho.com.tw

E-mail : service@novaortho.com.tw

Customer Service : 0800-036-678

Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546

Add : 台中市神岡區豐洲路1096號